

# MODE D'EMPLOI<sup>1</sup>

Stylo prérempli Repatha® SureClick® à usage unique.




Voici un code-QR vers une vidéo montrant comment vous administrez REPATHA® avec le stylo prérempli SureClick®.


Seulement accessible avec le code suivant : 6954

## SCHÉMA DES DIFFÉRENTES PARTIES


### Avant utilisation

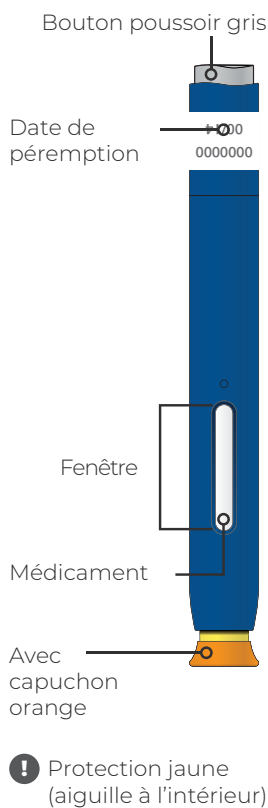

### Après utilisation

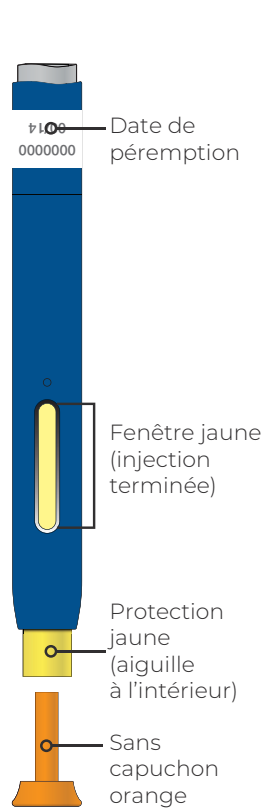

## B. Inspectez le stylo prérempli de Repatha®.

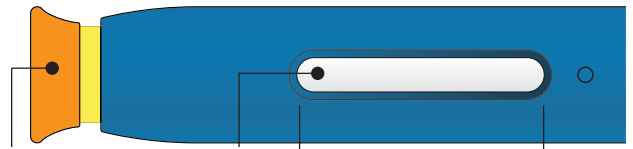

Avec le capuchon orange Médicament Fenêtre

**Regardez l'aspect du médicament par la fenêtre du stylo. Il doit être clair à opalescent, et incolore à légèrement jaune.**

**Vérifiez la date de péremption.**

**Ne pas** utiliser le stylo prérempli si :

- ✗ Le médicament est trouble ou présente une coloration anormale ou s'il contient de gros grumeaux, des paillettes ou des particules.
- ✗ Une partie semble fissurée ou cassée.
- ✗ Le stylo prérempli est tombé.
- ✗ Il manque le capuchon orange ou si celui-ci n'est pas correctement en place.
- ✗ La date de péremption est dépassée.

Dans tous ces cas, utilisez un nouveau stylo prérempli.

## C. Rassembler tout le matériel nécessaire pour pratiquer l'injection.


Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau. Sur une surface propre et bien éclairée, placez :

- Un stylo prérempli neuf
- Des lingettes alcoolisées
- Du coton ou de la gaze
- Un pansement
- Un conteneur à déchets tranchants

## D. Préparer et nettoyer le site d'injection

**Vous pouvez utiliser :**

- **La partie externe du haut du bras** (uniquement si l'injection est réalisée par une tierce personne).
- **Région abdominale (ventre)** (à plus de 5 cm du nombril).
- **Cuisse**

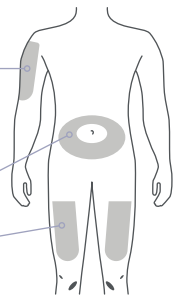

Nettoyez le site d'injection avec une lingette alcoolisée. Laissez sécher votre peau.

- ✗ **Ne plus** toucher cette zone avant d'effectuer l'injection.
- ✗ Choisissez un site différent à chaque fois que vous pratiquez une auto-injection. Si vous avez besoin d'utiliser le même site d'injection, assurez-vous simplement qu'il ne s'agit pas exactement du même endroit que celui que vous avez utilisé la dernière fois.
- ✗ **Ne pas** injecter le médicament dans des zones où la peau est sensible ou présente une ecchymose, une rougeur ou une induration. Évitez d'injecter dans les zones comportant des cicatrices ou des vergetures.

## ÉTAPE 1 : AVANT UTILISATION

### A. Retirez un stylo prérempli de Repatha® de la boîte.

Sortez le stylo prérempli de la boîte avec précaution.

Remettez l'emballage d'origine contenant tout stylo prérempli non utilisé au réfrigérateur.

Patientez au moins 30 minutes afin que le stylo prérempli atteigne naturellement la température ambiante avant de pratiquer l'injection.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la notice d'information patient qui se trouve dans la boîte du médicament.


1. Repatha®, notice patient. Dernière version.

E.R. Amgen s.a. - Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem  
BEL-145-0323-80001 (v2.0) - Date de création : 7 mars 2023

**AMGEN**

## ÉTAPE 2 : AVANT INJECTION

**E. Retirez le capuchon orange dans l'axe du stylo, seulement lorsque vous êtes prêt(e) à procéder à l'injection. Ne pas enlever le capuchon orange pendant plus de 5 minutes. Ceci pourrait assécher le médicament.**

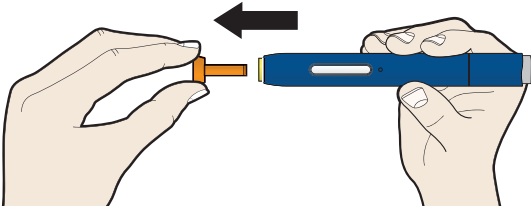

Il est normal de voir une goutte de liquide à l'extrémité de l'aiguille ou au niveau de la protection jaune.

**X Ne pas** tordre et ne pas plier le capuchon orange.


**X Ne pas** remettre le capuchon orange sur le stylo prérempli.

**X Ne pas** mettre vos doigts dans la protection jaune.

**Important : Ne pas** retirer le capuchon orange du stylo prérempli avant d'être prêt(e) à procéder à l'injection. S'il vous est impossible d'effectuer l'injection, veuillez contacter votre professionnel de santé.

**F. Créez une surface ferme au niveau du site d'injection sélectionné (cuisse, abdomen ou la partie externe du haut du bras) à l'aide de la méthode de l'étirement ou de la méthode du pincement.**

**Méthode d'étirement OU méthode de pincement**

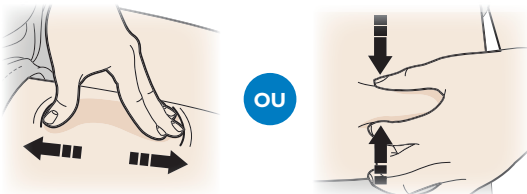


Pincer/étirer la peau fermement entre le pouce et les autres doigts pour créer une zone d'environ 5 cm de largeur.

**IMPORTANT :** Il est important que la peau demeure étirée ou pincée pendant l'injection.


## ÉTAPE 3 : INJECTION

**G. Continuez à maintenir l'étirement ou le pincement de la peau. Sans le capuchon orange, placez la protection jaune sur votre peau à 90 degrés. L'aiguille se trouve à l'intérieur de la protection jaune.**

**Ne pas encore** toucher le bouton de démarrage gris.

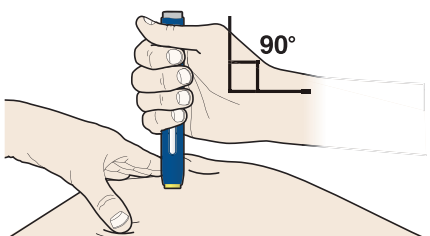


**H. Appuyez fermement le stylo prérempli sur la peau jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.**

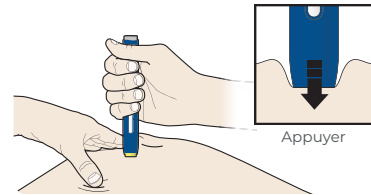


**Important :** Vous devez appuyer au maximum mais **ne pas** toucher le bouton de démarrage gris tant que vous n'êtes pas prêt(e) à procéder à l'injection.

**I. Lorsque vous êtes prêt(e) à procéder à l'injection, appuyez sur le bouton de démarrage gris. Vous entendrez un 'clac'.**

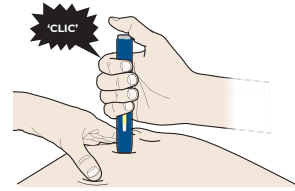

**J. Continuez à appuyer sur la peau. Puis soulevez votre pouce tout en maintenant toujours le stylo prérempli sur votre peau. L'injection peut durer environ 15 secondes.**

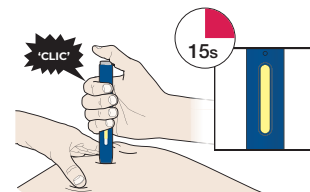

- La fenêtre passe du clair au jaune une fois l'injection terminée.

- Vous pouvez entendre un second clic.

Lorsque vous retirez le stylo prérempli de votre peau, l'aiguille est automatiquement protégée.

## ÉTAPE 4 : APRÈS INJECTION

**K. Jetez le stylo prérempli usagé ainsi que le capuchon orange de l'aiguille.**

Jetez le stylo prérempli usagé ainsi que le capuchon orange dans un conteneur à déchets tranchants.

Discutez avec médecin/pharmacien de l'élimination adéquate.

**X Tenir** le stylo prérempli et le conteneur à déchets tranchants hors de la vue et de la portée des enfants.

**X Ne pas** réutiliser le stylo prérempli.

**X Ne pas** remettre le capuchon du stylo prérempli et ne pas mettre vos doigts dans la protection jaune.



**X Ne pas** recycler le stylo prérempli ou le conteneur à déchets tranchants et ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

**L. Examiner le site d'injection.**

En cas de saignement, appliquer du coton ou une compresse en gaze sur le site d'injection. **Ne frottez pas** le site d'injection. Appliquez un pansement si nécessaire.