

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK¹

Repatha® SureClick® voorgevulde pen voor éénmalig gebruik.




Hieronder vindt u de QR code van een video die toont hoe REPATHA® toe te dienen met de voorgevulde SureClick® pen.


Enkel toegankelijk met volgende code: 6954

OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN

Voor gebruik

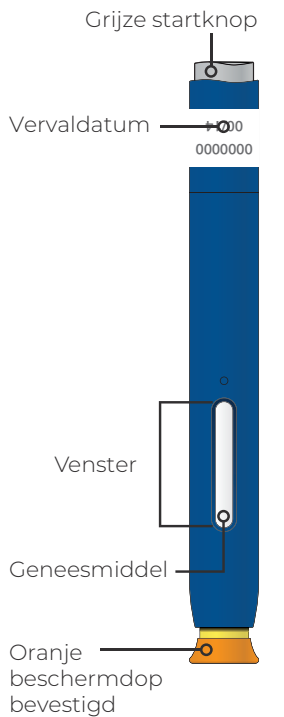

Na gebruik

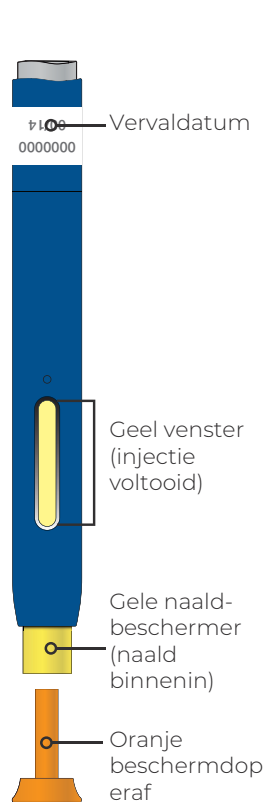

STAP 1: VOOR HET GEBRUIK

A. Haal één voorgevulde pen met Repatha® uit de verpakking.

Pak de voorgevulde pen voorzichtig recht uit de doos.

Leg de oorspronkelijke verpakking met nog niet gebruikte voorgevulde pennen terug in de koelkast.

Wacht ten minste 30 minuten zodat de voorgevulde pen op natuurlijke wijze op kamertemperatuur komt vóór u een injectie toedient.


Voor verdere informatie, bekijk de bijsluiter die met het geneesmiddel is meegeleverd.

1. Repatha®, bijsluiter. Laatste versie

V.U. Amgen n.v. - Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem
BEL-145-0323-80001 (v2.0) - Creation date: 7 maart 2023

AMGEN

B. Inspectie van de voorgevulde pen met Repatha®

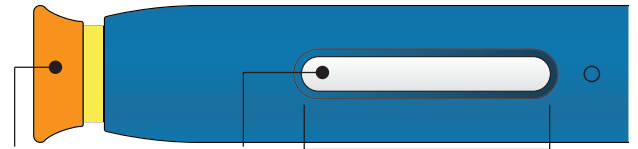

Oranje beschermdop erop Geneesmiddel Venster

Controleer of het geneesmiddel in het venster helder is en kleurloos tot lichtgeel.

Controleer de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik de voorgevulde pen niet als:

- ✗ Het geneesmiddel troebel of verkleurd is of grote klonten, vlokken of vaste deeltjes bevat.
- ✗ Een onderdeel gebarsten of stuk lijkt.
- ✗ De voorgevulde pen gevallen is op een hard oppervlak.
- ✗ De oranje beschermdop ontbreekt of niet goed vast zit.
- ✗ De uiterste gebruiksdatum verstreken is.

In al deze gevallen moet u een nieuwe voorgevulde pen gebruiken.

C. Zorg dat u alle materialen voor de injectie bij de hand heeft

Was uw handen goed met water en zeep.


Leg op een schoon, goed verlicht oppervlak klaar:

- Een nieuwe voorgevulde pen
- Alcoholdoekjes
- Wattenbolletje of gaasje
- Pleister
- Scherpafvalcontainer

D. Bereid de injectieplaats voor en reinig deze

Gebruik alleen deze injectieplaatsen:

- **De buitenkant van uw bovenarm** (als iemand anders de injectie bij u toedient).
- **Uw buikstreek (abdomen)** met uitzondering van een gebied van 5 centimeter rond de navel.
- **Uw dijbeen**

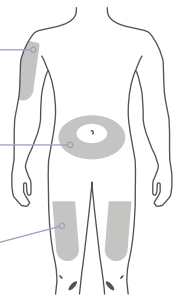


Reinig de injectieplaats met een alcoholdoekje. Laat de huid drogen.

- ✗ Raak dit deel van de huid niet meer aan voor u gaat injecteren.
- ✗ Voor het toedienen van een injectie moet u elke keer een andere plek kiezen. Als u dezelfde locatie moet gebruiken voor de injectie, zorg dan wel dat het niet precies dezelfde plaats is als de vorige keer.
- ✗ Injecteer niet op plaatsen met blauwe plekken of waar de huid gevoelig, rood of hard is. De injectie niet toedienen in gebieden met littekenweefsel of striae.

STAP 2: VOOR DE INJECTIE

E. Trek de oranje beschermdop er recht vanaf, pas wanneer u klaar bent om te injecteren. Laat de oranje beschermdop er **niet** langer dan **5 minuten** af. Hierdoor kan het geneesmiddel uitdrogen.

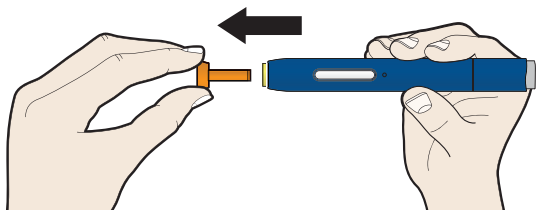

Een druppeltje vloeistof aan het uiteinde van de naald of de gele naaldbeschermer is normaal.


- ✗ U mag de oranje beschermdop niet draaien, buigen of heen en weer bewegen.
- ✗ Zet de oranje beschermdop niet op de voorgevulde pen terug.
- ✗ Steek uw vingers niet in de gele naaldbeschermer.

Belangrijk: Verwijder de oranje beschermdop niet van de voorgevulde pen totdat u klaar bent om te injecteren.

Neem contact op met uw arts als injecteren niet lukt.

F. Zorg voor een stevig oppervlak op de gekozen injectieplaats (dijbeen, buik of buitenkant van de bovenarm) door de huid strak te trekken of samen te knijpen.

Strak trekken OF knijpen

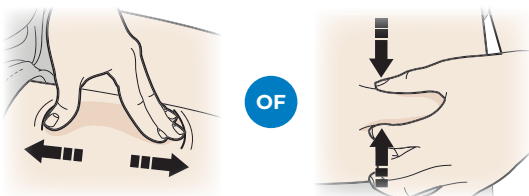


Trek de huid goed strak door uw duim en vingers in tegengestelde richting te bewegen of knijp de huid stevig tussen duim en vingers samen, zodat een gebied van ongeveer 5 centimeter breed ontstaat.

Belangrijk: Het is belangrijk tijdens de injectie de huid strakgetrokken te houden of erin te blijven knijpen.


STAP 3: DE INJECTIE

G. Houd de huid strakgetrokken of samengeknepen. Verwijder de oranje beschermdop en plaats de gele beschermdop in een hoek van 90 graden (loodrecht) op uw huid. De naald zit in de gele naaldbeschermer.

Raak de grijze startknop nog **niet** aan.

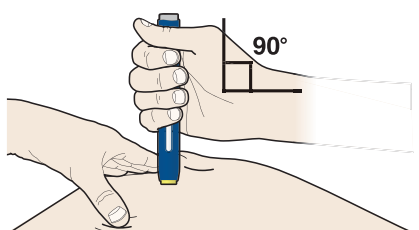

H. Duw de voorgevulde pen stevig tegen de huid tot hij niet verder kan

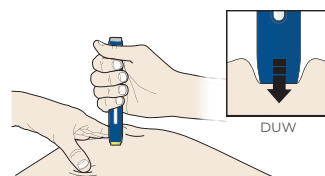


Belangrijk: U moet hem helemaal omlaag drukken, maar raak de grijze startknop **niet** aan tot u klaar bent om te injecteren.

I. **Druk** op de grijze startknop zodra u klaar bent om te injecteren. U hoort een **klik**.



J. Blijf de pen op de huid **drukken**. Til dan uw duim op, terwijl u de voorgevulde spuit op uw huid blijft houden. De injectie kan tot 15 seconden duren.

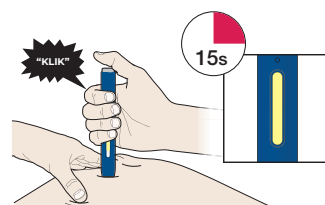

- Het venster verandert van helder naar geel zodra de injectie klaar is.

- U kunt een tweede klik horen.


Zodra u de voorgevulde pen van uw huid haalt, wordt de naald automatisch afgeschermd.

STAP 4: NA DE INJECTIE

K. Werp de gebruikte voorgevulde pen en oranje beschermdop weg.

Werp de gebruikte voorgevulde pen en de oranje beschermdop in een scherpafvalcontainer.

Praat met uw arts/apotheker over hoe u het afval op de juiste wijze moet weggooien.

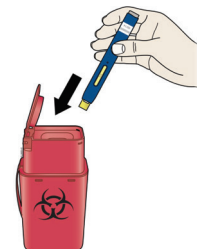

- ✗ Houd de voorgevulde pen en de scherpafvalcontainer buiten het zicht en het bereik van kinderen.
- ✗ U mag de voorgevulde pen niet opnieuw gebruiken.
- ✗ Plaats de beschermdop niet op de voorgevulde pen terug en steek uw vingers niet in de gele naaldbeschermer.
- ✗ U mag de voorgevulde pen of scherpafvalcontainer niet hergebruiken of in de vuilnisbak weggooien.

L. **Inspecteer de plaats van de injectie.**

Als u bloed ziet, druk dan een wattenbolletje of gaasje op de plaats van de injectie. Wrijf **niet** over de injectieplaats. Breng indien nodig een pleister aan.